

Lordflex's s.r.l.

Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**
www.lordflex.com info@lordflex.com

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Ancona REA 68020

Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423

European Vat Identification Cod. IT00190580423

Lordflex's
dormire bene aiuta la vita

CE – Dichiarazione di conformità
CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details		CE
Prodotto/product name	DIVA	
Identificazione/type	L=Tipo inserti	
	Variante	
	F	Rete con 14 doghe in faggio, struttura in acciaio di alta qualità e resistenza, inserti delle doghe nella struttura fissi non ammortizzati
	A	Rete con doghe in faggio, struttura in acciaio di alta qualità e resistenza, inserti delle doghe nella struttura con ammortizzatori in caucciù
Destinazione d'uso/intended use	Rete/letto per pazienti/ / infirm bed/	
Classificazione 93/42/CEE, Allegato IX Classification according to RL93/42/EEC, annex IX	Classe I, per la rla 1/ class I per rule 1	
Altre classificazioni/other classing	N.A.	
Ente notificato/Notified body	N.A.	
Numero certificato/certificate number	N.A.	
Procedura di certificazioni in accordo con 93/42/CEE/Procedure according to RL93/42/EEC	Allegato VII/Annex VII	
Numero di registrazione/NSIS number	1567165	
Codice GMDN/GMDN code	30030	

50
19672017



Lordflex's s.r.l.

Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)
60030 SERRA DE' CONTI (AN)
tel. **0731 879466/7** fax **0731 878155**
www.lordflex.com info@lordflex.com

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Ancona REA 68020

Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423

European Vat Identification Cod. IT00190580423

Lordflex's
dormire bene aiuta la vita

Codice CND/CND code	V0801
Norme armonizzate/Harmonized standards	EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011, UNI EN 1725/2000
Altre norme applicate/Other standards	Altre

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con la direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni

We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with directive 93/42/EEC.

Serra De' Conti(AN), 12/06/2017

LORDFLEX'S SRL

Il titolare


Guerrino Bini

50
19672017



RETE DIVA

Manuale d'uso

 Lordflex's Srl
Via Carrara 11
60030 Serra de Conti (AN)



Rev. n° 1 del 13/05/17 Pag. 1 di 7

Rete Diva

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. prodotto e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.

La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.

Cordialmente Le auguriamo buon riposo.

Rete Diva

Manuale Utente

INDICE

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI	4
4. DESCRIZIONE DELLA RETE	5
5. INSTALLAZIONE E USO	5
6. ETICHETTE	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:	6
7. PULIZIA	7
8. SMALTIMENTO	7
9. GARANZIA	7

Rete Diva

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;

2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale è una rete fissa destinata all'uso per pazienti affetti da patologie croniche o acute non aventi problematiche ortopediche gravi che necessitino di trazione o altre terapie ortopediche

3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbricante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo alla Direttiva Europea 93/42/CE emendata dalla 2007/47/CE sui dispositivi Medicali

Rete Diva

4. DESCRIZIONE DELLA RETE

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

Le reti per letti (o letti per pazienti) sono ausili necessari per l'appoggio del materasso su cui l'utilizzatore o il paziente devono passare le ore notturne o diurne, per il sonno o stabilmente in caso di patologie che lo richiedano.

Le nostre reti Diva sono realizzate in profili di acciaio di alta qualità (dimensioni del tubo mm 25x50) con 14 doghe di faggio alta qualità da 7 cm di larghezza destinate ad accogliere il materasso da appoggiarvi. Ai 4 spigoli sono applicati piedi in acciaio con diametro pari a 50mm.

Le misure delle reti sono personalizzate in base alle richieste del cliente (le misure standard sono per i letti singoli da cm 80x190 a cm 90x200, per i letti da una piazza e mezza le misure standard vanno da cm 120x190 a cm 120x200 a 140x200, per le dimensioni matrimoniali le misure standard vanno da cm 160x190 a 180x200; si possono realizzare anche misure non standard).

Tra la struttura in acciaio e le doghe possono essere applicati a richiesta appositi ammortizzatori in caucciù (esclusivamente allo scopo di migliorare il comfort).

5. INSTALLAZIONE E USO

L'installazione della rete Diva è estremamente semplice. Dopo aver aperto l'imballo e liberato il corpo della rete, applicare i piedi tramite l'inserimento della vite nell'apposito foro realizzato nella staffa angolare sui 4 spigoli della rete.

Se presente (nel caso di reti matrimoniali rinforzate), avvitare anche il piede di rinforzo al centro della rete.

Infine appoggiare i piedi al suolo; sarà possibile a questo punto appoggiarvi sopra il materasso ed utilizzarla.

6. ETICHETTE

La rete è identificata dalla seguente etichetta adesiva ad essa applicata:

Lordflex's
DORMIRE BENE AIUTA LA VITA

RETE

Modello:
DIVA

Misura:
90X200

Prodotto:
11101090200

Commissione N° 149

D. 170821

Site internet:
Lordflex s.r.l. Via Carrara 11 - I.p. 302 - 60030
Serra de' Conti - AN - Italia
Tel. 071 874888 - Fax 071 874155
info@lordflex.com - www.lordflex.com

MATERIALI IMPIEGATI E METODI DI LAVORAZIONE

Tutte le lavorazioni sono svolte con le migliori tecnologie e materiali di prima qualità.

Il letto è stato studiato e progettato per offrire il massimo comfort e benessere al cliente.

Per tutte le informazioni rivolgetevi al servizio clienti.

Per maggiori informazioni visitate il sito internet: www.lordflex.com

Questo prodotto è conforme alle norme CE e ai requisiti di sicurezza e qualità per il prodotto letto.

Per informazioni e assistenza rivolgetevi al servizio clienti.

Il letto è stato studiato e progettato per offrire il massimo comfort e benessere al cliente.

Per tutte le informazioni rivolgetevi al servizio clienti.

Per maggiori informazioni visitate il sito internet: www.lordflex.com



ISTRUZIONI PER L'USO

Pulizia
Rivolgetevi al servizio clienti.

Manutenzione
Controllare periodicamente lo stato di conservazione del letto.

Precauzioni d'uso
Evitare di sovraccaricare il letto con oggetti pesanti.

Modalità di smaltimento
Smaltire il prodotto in modo corretto secondo le norme vigenti.



Lordflex's s.r.l.
Via Carrara, 11
60030 Serra de' Conti (AN)

Disp.medico

Modello: Rete Diva
Anno di produzione:
Numero di serie:
Dimensione:
Condizioni di conservazione:
Temperatura: + 15°C / 35°C
Umidità relativa: 45% / 75%



7. PULIZIA

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate la rete . Per la pulizia far riferimento all'etichetta

8. SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

9. GARANZIA

La Lordflex's garantisce la rete contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica della rete , che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's , farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente.

In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.